

Xtract™SR Stretcher – instruktioner

Ett modulärt system som kan anpassas efter vad ditt uppdrag kräver.



Hinder att hantera:



Begränsat
utrymme och vikt



Utmattade
räddningsarbetare



Pågående vård



Särdrag på vägen



Ogynnsamt
väder



VARNING

Det är användaren av lyft-, räddnings- och säkerhetsutrustning som ansvarar för att skaffa sig behörig utbildning och instruktioner samt vidta lämpliga säkerhetsåtgärder vid användning av utrustningen.

Användningen av **Xtract™SR Stretcher** förutsätter att det medicinska stödet är begränsat och att användaren har bestämt att **Xtract™SR-Stretcher** är den bästa metoden för att förflytta den skadade.

Hur lämplig **Xtract™SR Stretcher** är varierar beroende på situationen. Det finns ingen garanti för att produkten är effektiv i din specifika arbetssituation.

Information om medicinteknisk utrustning



VARNING - Risk för fel på produkten

Xtract™SR Stretchers får endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd inte **Xtract™SR Stretchers** för något annat ändamål.

TSG Associates LLP försäkrar på eget ansvar att både **Xtract™SR Stretchers** och **Xtract™SR Afloat** överensstämmer med UK Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No 618 i dess ändrade lydelse) som justerats genom Medical Devices Regulations 2019 (ändringar etc.) (EU-utträde) och Medical Devices Regulations 2020 (ändringar etc.) (EU-utträde).

TSG Associates LLP försäkrar på eget ansvar att bårn **Xtract™SR Stretchers** och **Xtract™SR Afloat** överensstämmer med tillämpliga krav i Europaparlamentets och rådets krav enligt förordning (EU) 2017/745 från den 5 april 2017 gällande medicintekniska produkter.

EU:s direktiv om medicintekniska produkter – bilaga I, punkterna 1 och 2 har vidhållits genom att:

Enheten har konstruerats och tillverkats på ett sådant sätt att användarna, när enheten används under de förhållanden och för de ändamål som den är avsedd för, inte äventyrar den skadades kliniska tillstånd eller säkerhet, eller användarnas eller andra personers säkerhet och hälsa.

Lösningar och åtgärder för att identifiera risker har antagits genom att först försöka eliminera eller minska risken så långt som möjligt, och därefter lägga till skyddsåtgärder. Slutligen genom att informera användarna om eventuella kvarstående risker som beror på eventuella brister i de vidtagna skyddsåtgärderna.

TSG Associates LLP intygar att **Xtract™SR** överensstämmer med US Federal Act-21 CFR, del 800.

Förutsättningar för användning



WARNING - Risk för fel på produkten

Före användning måste följande kontroller utföras för att säkerställa att utrustningen fungerar säkert.

En grå ruta anger var en kontroll krävs för en viss del av utrustningen.

Kontroller som krävs före användning	Xtract™SR Stretcher	Xtract™SR XStraps	Xtract™SR Base	Xtract™SR Backpack
Är du behörig att använda utrustningen?				
Är utrustningen lämplig för den skadade personens tillstånd?				
Ligger uppgiften inom utrustningens kapacitet?				
Är materialet i gott skick?				
Är sömmarna felfria?				
Är utrustningen ren och fri från smuts?				
Komponenter som krävs	Xtract™SR Stretcher	Xtract™SR XStraps	Xtract™SR Base	Xtract™SR Backpack
Manuell				
Dragkedjor				

Lägg en skadad person i Xtract™SR-Stretcher




VARNING - Risk för personskada

Det är räddningsmanskapets ansvar att bedöma om **Xtract™SR Stretcher** är lämplig för evakuering av den skadade personen.


Placera **Xtract™SR Stretcher** intill den skadade personen.

Den skadade personens axlar ska vara i linje med de röda axelhandtagen.

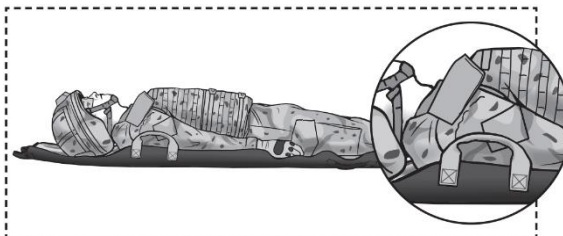

Position under den skadade.

Använd dragnöret i fot- och huvudändan för att dra åt **Xtract™SR Stretcher** runt den skadade tills den sitter ordentligt.

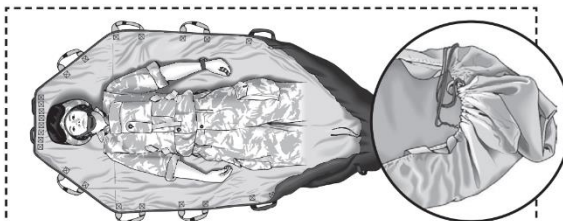

Säkra **Xtract™SR Stretcher** med hjälp av de "snabbspända" gummirepen. För dem över den skadade och fäst dem ordentligt med kardborreband.



Dra en skadad person med Xtract™SR Stretcher och Xtract™SR XStraps



VARNING – Risk för allvarliga personskador

Att dra baren med axelhandtagen är tillåtet endast om **Xtract™SR** Base korrekt monterad. Det finns risk för allvarliga huvudskador om detta inte är i sin ordning.

Lägg den skadade personen i **Xtract™SR** Stretcher med en vidhängande basplatta.

Innan du använder **Xtract™SR** XStraps ska du utföra de nödvändiga kontrollerna för användning.

Fäst en karbinhake i bogseringsöglan på det röda axelhandtaget.



Rulla ut **Xtract™SR** XStraps och använd dem som hjälp vid utsläpning.



Lyft en skadad person i Xtract™SR Stretcher med hjälp av Xtract™SR XStraps

Lägg den skadade personen i Xtract™SR Stretcher.

Innan du använder Xtract™SR XStraps ska du uppfylla de krav som ställs för användning.

Fäst karbinhaken i det röda axelhandtaget.

Välj en ögla på din Xtract™SR XStrap och placera en karbinhake i den.



Fäst karbinhaken i det gröna bäckenhandtaget, så att en ögla skapas i sadeljorden.

Dra remmen över axeln.



Lyft långsamt tillsammans upp den skadade med händerna på bäckenhandtagen.

Ytterligare räddningsmanskap kan behövas för att hjälpa till med lyftet och rikta in den skadades position.



Xtract™SR Base – Så här fäster du den på Xtract™SR Stretcher



VARNING

Var försiktig så att du inte skär av något tyg när du byter ut en gammal **Xtract™SR Base**, eftersom resultatet blir att **Xtract™SR Base** kan betraktas som obrukbar.

Xtract™SR Base är konstruerad för att vara en utbytbar komponent.

Innan du använder Xtract™SR Base ska du uppfylla de krav som ställs för användning.

Lämpligheten för användning ligger helt och hållet hos livräddaren.

Ta bort den gamla Xtract™SR Base genom att klippa av buntbanden (var försiktig så att du inte skär i något tyg eftersom detta gör Xtract™SR Stretcher oanvändbar).

Öppna din Xtract™SR Stretcher med fästena för molle-öglorna vända uppåt.

Rikta in den nya Xtract™SR Base med molle-öglan.

Börja med att föra in och dra åt med buntbanden, först vid fotänden och sedan vid huvudänden av Xtract™SR Stretcher.

Avsluta monteringen genom att föra in buntbanden genom varje hål i plastbasen och se till att de sitter så hårt som möjligt.

När du är klar ska du kontrollera att monteringen är säker.

NOTERINGAR

För bästa resultat ska buntbanden först föras upp genom molle-öglan och sedan genom hålen i plastbasen. Överflödiga buntbandsplast kan stoppas in mellan basen och plasten. Vi rekommenderar inte att du klipper av buntbanden.



Xtract™SR Stretcher – Rengöring



VARNING – Skada på produkten

Använd INTE blekmedel, industrirengöringsmedel, syror, alkaliska oxidationsmedel, frätande ämnen eller kokande vatten på någon av **Xtract™SR Stretcher-produkterna**.

Xtract™SR Stretcher

Allmän rengöring

Tvätta för hand i högst 40 °C med ren tvål och skölj i rent kallt vatten.

Desinficering;

Maskintvätt i 60 °C med mildt hushållstvättmedel (maximalt fem gånger).

Xtract™SR Base

Allmän rengöring;

Ta bort **Xtract™SR Base** före allmän rengöring. Tvätta för hand med varmt vatten, mildt rengöringsmedel och en engångstrasa.

Desinficering;

Ta bort från **Xtract™SR Base** före desinficering. Om någon av de absorberande ytorna är biologiskt kontaminerad ska den kasseras på lämpligt sätt.

Xtract™SR XStraps/Backpack/Equaliser Pouches/FM5 Stuff Sack

Allmän rengöring;

Tvätta och rengör för hand, högst 30 °C, med ren tvål och skölj i rent kallt vatten.

Desinficering;

Om produkten är biologiskt kontaminerad ska den kasseras på lämpligt sätt.

Xtract™SR Stretcher– inspektion



VARNING - Risk för fel på produkten

Grundliga inspektioner före användning är mycket viktiga. Användarens och den skadades säkerhet är beroende av att produkterna fortsätter att fungera korrekt.

Besiktning

Utrustningen måste kontrolleras före och efter varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar korrekt.

Dessutom måste en noggrann inspektion utföras var sjätte månad av en behörig person. Dessa kontroller ska dokumenteras.

När produkterna används intensivt eller i särskilt tuffa miljöer bör detaljerade mellaninspektioner utföras.

Förvaring

All utrustning måste vara ren och torr innan den förvaras.

Låt den alltid torka naturligt på avstånd från direkt värme

Förvaring ska ske i ett svalt, torrt och välventilerat utrymme skyddat från överdriven värme, fuktighet, vassa kanter, frätande ämnen, solljus och andra källor till UV-ljus.

Xtract™SR Stretcher– inspektion

Produktkod	Produktnamn	Partinummer/UDI-nummer	Produktdatum
Inspektionsprotokoll			
Datum	Kommentarer	Namn/initialer	Nästa förfallodag
Desinficering			
	Underskrift	Datum	
1			
2			
3			
4			
5			

Specifikation – Xtract™SR Stretcher

Xtract™SR Stretcher är vår minsta och lättaste lösning, idealisk för fotpatrullering och kamraträddning.



Xtract™SR Stretcher

NSN 6530-99-315-5529

Klass 1 Medicinsk utrustning

UDI – se webbplatsen

Hinder att hantera:



Begränsat utrymme och vikt



Utmattade räddningsarbetare



Pågående vård



Särdrag på vägen



Försämrning av skadan

Uppnådde klassificeringen "ej antändlig" vid provning enligt EN 597-1:2015-bedömning av antändlighet hos madrasser och stoppade sängbottnar: antändningskälla: glödande cigarett

Immateriella rättigheter

Patent och designrättigheter gäller. För immateriella rättigheter, se vår webbplats www.tsgassociates.co.uk för mer information.

Detaljer	Värden i metriska systemet	Värden i brittisk standard
Maximal belastning	250 kg	550 lbs
Mått i förpackning	280 x 180 x 120 mm	11 x 7 x 5 tumm
Utplacerade mått	2 690 x 1 030 mm	106 x 41 tumm
Vikt	1 kg	2 pound
Färg	Svart	Svart
Steril	Nej	Nej





TSG Associates LLP
Albany Works
Long Lover Lane, Pellon
Halifax, HX1 4QF
Storbritannien

T : +44 (0)1422 380097

www.tsgassociates.co.uk

